



CHARISMA®
Diamond ONE

LIBRE
de monómeros
relacionados
con BPA

CHARISMA DIAMOND

ONE
PARA LO
BÁSICO




Charisma® Diamond ONE
Un solo tono para posteriores.

Salud bucal en las mejores manos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

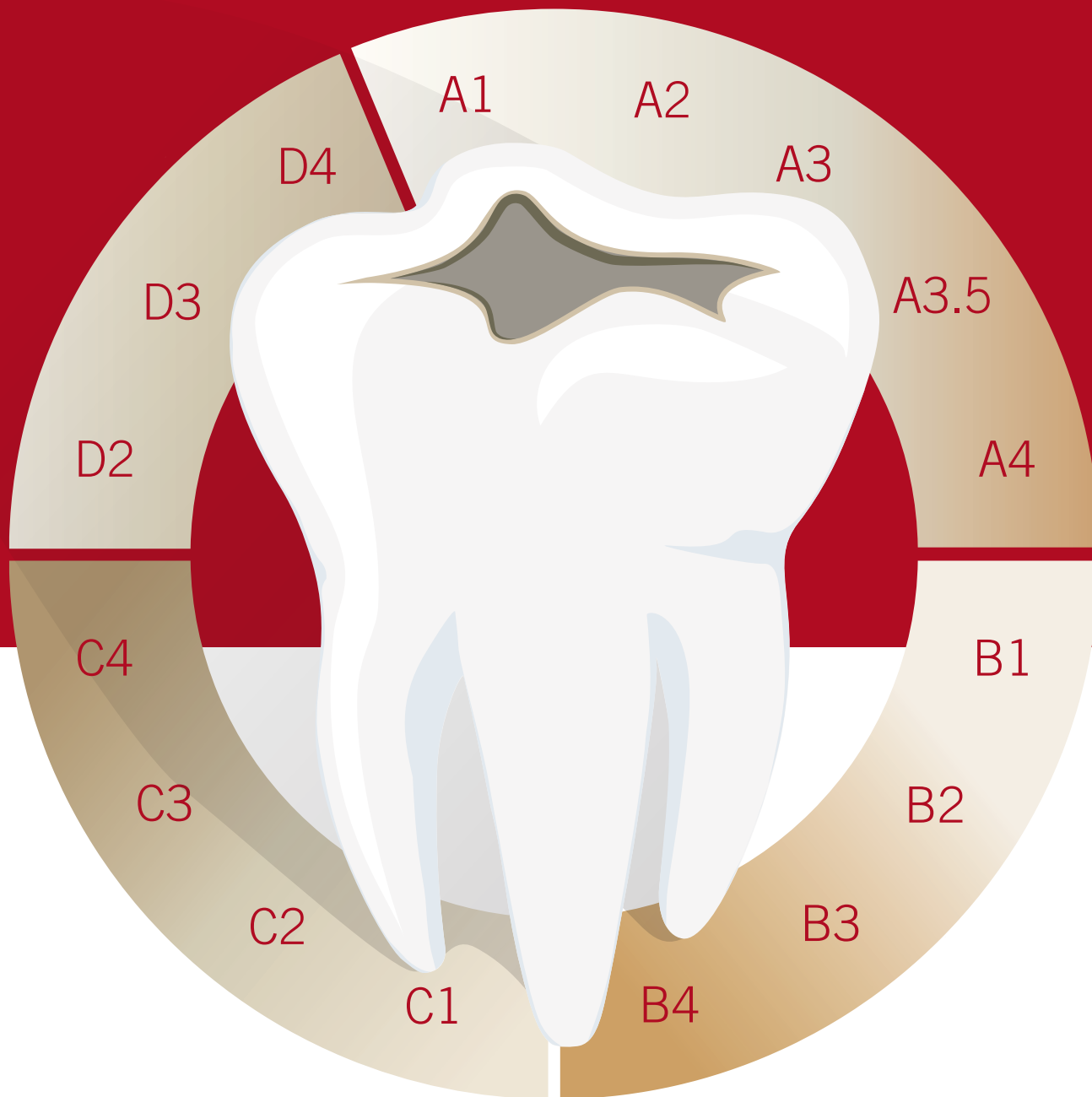

Video: kulzer.mx/AjusteAdaptativoLuz



UN TONO PARA TODO

Siempre elige el tono adecuado para obtener restauraciones de aspecto natural

Charisma® Diamond ha ampliado los límites de la estética, la calidad y el rendimiento. Ahora con la nueva Charisma® Diamond ONE, es más fácil que nunca conseguir un aspecto extraordinariamente natural, incluso en la zona posterior.


Charisma® Diamond ONE se funde perfectamente con la dentición circundante, independientemente del color del diente, permitiendo que las restauraciones simplemente desaparezcan. Esto ofrece una nueva solución de un solo color para la mayoría de los casos cotidianos.

Asombroso ajuste adaptativo de luz

Charisma® Diamond ONE determina el color de la restauración absorbiendo las ondas de luz que se reflejan en la estructura dental circundante.



Cavidades oclusales en dientes artificiales de diferente color, restaurados con Charisma® Diamond ONE.

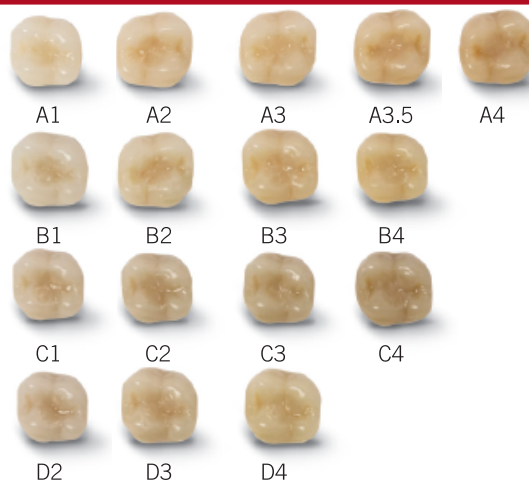



UN MANEJO EFICAZ

Belleza natural sin necesidad de seleccionar el color. ¡fácil!

Su manejo es tan fácil como el manejo de Charisma® Diamond, que ha sido reconocido y elogiado por odontólogos en todo el mundo durante más de 10 años.

Las características más destacadas de Charisma® Diamond para un manejo sencillo:

- Consistencia firme para poder esculpir y modelar con facilidad
- Tiempo de trabajo prolongado
- Excelente pulido gracias a las nano-partículas ultra-finas
- Aprobada para combinarse con GLUMA® Bond Universal – el adhesivo universal confiable y altamente eficaz de Kulzer.



Charisma® Diamond ONE tiene una alta radio-opacidad que garantiza un diagnóstico confiable.
Fuente: Prof. C.-P. Ernst, Mainz, Alemania



Cavidad excavada y preparada. Caso de: Nicola Scotti, Universidad de Turin, Italia



Restauración de Charisma® Diamond ONE en diente 26. Excelente adaptación de color.



"Para mí, el composite adecuado tiene que permitirme hacer mi trabajo y proporcionar resultados reproducibles. Charisma Diamond lo hace por mí. ¿Características de éxito? Las tiene. ¿Material probado? Totalmente. ¿Un tono para los casos menos exigentes? Es bueno saber que las cosas son cada vez más fáciles"

Dr. Dinos Kountouras,
Queensland, Australia

LIBRE
de monómeros
relacionados
con **BPA**

UNA SOLUCIÓN CONFIABLE

Extremadamente duradera - Exclusiva matriz TCD con sistema de relleno nano-híbrido optimizado


Charisma® Diamond ONE se beneficia de la combinación única de alta resistencia y bajo estrés de contracción de Charisma® Diamond, que ha sido bien documentada y probada en estudios clínicos.

¿Por qué es tan notable?


- **Restauraciones de larga duración:** La matriz de TCD y el sistema optimizado de relleno nano-híbrido hacen que Charisma® Diamond sea muy resistente a las fuerzas de masticación. Esto minimiza las fracturas de las restauraciones, que son, junto con las caries secundarias, las principales razones de los fracasos de las restauraciones de composite.
- **Biocompatibilidad garantizada:** Gracias a la utilización de nuestra matriz de TCD, Charisma® Diamond ONE está totalmente libre de Bis-GMA y de monómeros relacionados con el BPA.



Video: kulzer.mx/MatrizTCD

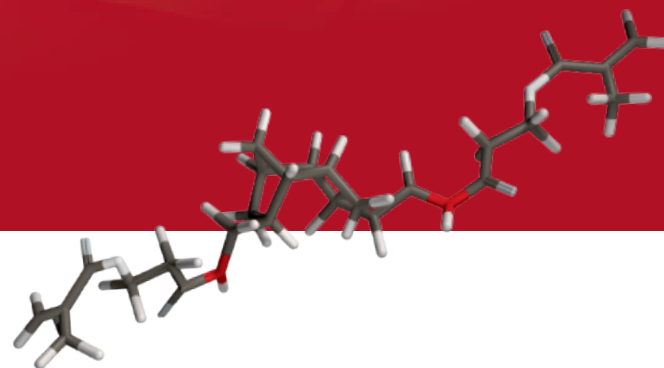

Excelentes características mecánicas

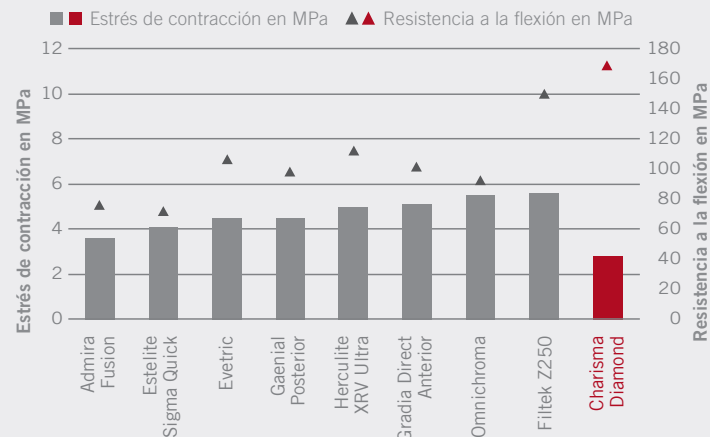

Fuente: Kulzer R&D, Wehrheim, Alemania. No publicado. Datos en archivo.

¿QUIERE PROBAR ONE?



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



Pídala ahora y Pruébela usted mismo

Kulzer México S.A. de C.V.

Tel. (55) 5531-5549 / Homero 527 int. 301-302, Polanco Reforma, Miguel Hidalgo CP 11550, Ciudad de México

www.kulzer.mx

Redes sociales: Kulzer Mexico Youtube: Kulzer Latinoamérica contacto-hkx@kulzer-dental.com

Código:	Artículo:	Contenido:
66087168	Charisma® Diamond ONE Refill	1 x 4g